

樹脂フォークへの取り付け方法 (A型・D型固定金具)

前キャスター・フォークの進行方向前側に
アブソレックスの固定金具の引っかかり部を沿わせ
取り付けボルト・ナットで固定して下さい。

M6 × 6.5mm・ナイロンナット



アブソレックス固定金具の向きにご注意下さい。




取り付け方向の間違い例

車椅子の進行方向


注意 前フォークの形状により固定金具には種類があります。
この形状の前フォークの場合にはA又はD型金具を使用してください

ARAYAの字が下側に位置するようにして下さい。

* フォークの車輪取付け穴が 8 の場合は 8 6 用のブッシュをフォークに嵌めて下さい

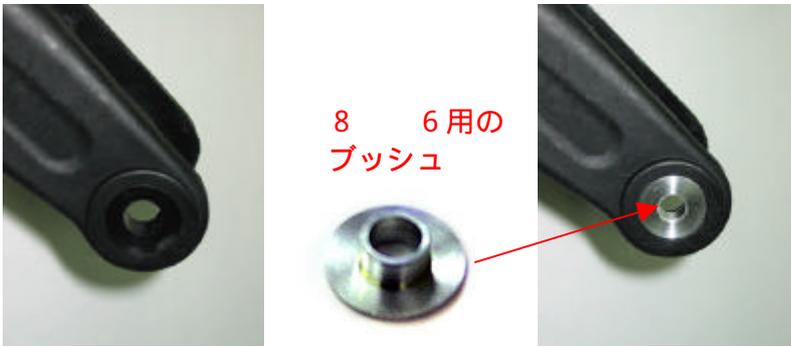

注意
取り付けボルトはアブソレックス内部のシルバ一色部分に必ず通して下さい。

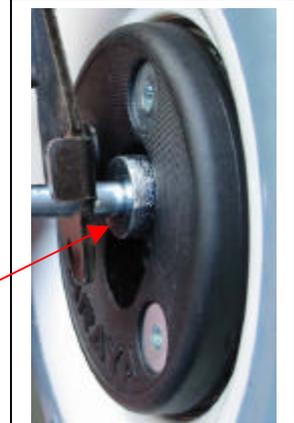

注意

1 : このホイールは一般型自走・介助用車椅子の前輪キャスター用に作られています。車椅子以外の用途には使用しないで下さい。



注意

2 : フォークの形状・内幅・取付穴径に応じて固定金具の種類があります、取付に際しては、適した金具とフォークの組み合わせをして下さい。フォークの形状・内幅・車輪取付穴径によっては取付できない場合があります、御了承下さい。



注意

3 : 防水構造ではありませんので水没するような使用はしないで下さい。



注意


4 : ご使用上 フォーク及びアブソレックスにキズや破損の無い事、車輪取付ネジの緩みの無い事に御留意下さい。



注意

5 : アブソレックスのベアリングには最適な量の潤滑材(専用グリース)が封入されていますので、ベアリングには決して注油しないで下さい。

アルミフォークへの取り付け方法 (D型固定金具)

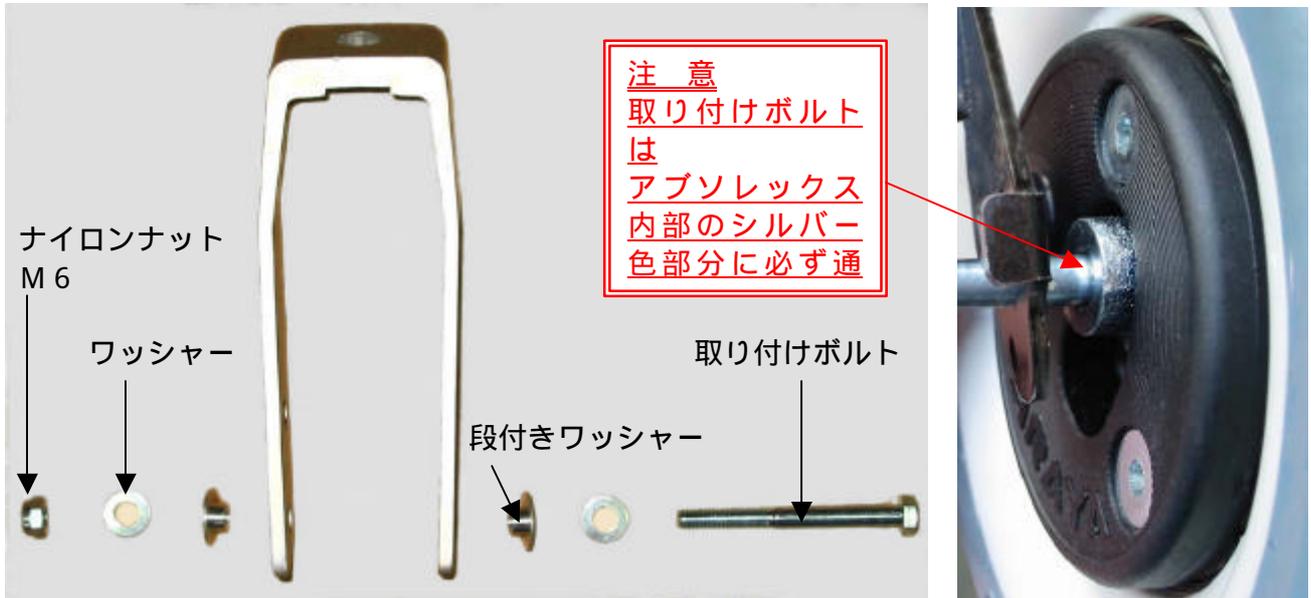

固定金具の方向に注意してフォークへ取付けてください。

フォークの車輪取付け穴が 8 の場合は 8 6用の段つきワッシャーを穴にはめて下さい。

注意

前フォークの形状により固定金具には種類があります。
この形状の前フォークの場合にはD型固定金具を使用してください。

D型固定金具



注意 1 : このホイールは一般型自走・介助用車椅子の前輪キャスター用に作られています。車椅子以外の用途には使用しないで下さい。



注意 2 : フォークの形状・内幅・取付穴径に応じて固定金具の種類があります、取付に際しては、適した金具とフォークの組み合わせをして下さい。フォークの形状・内幅・車輪取付穴径によっては取付できない場合があります、御了承下さい。



注意 3 : 防水構造ではありませんので水没するような使用はしないで下さい。




注意 4 : ご使用上 フォーク及びアブソレックスにキズや破損の無い事、車輪取付ネジの緩みの無い事に御留意下さい。



注意 5 : アブソレックスのベアリングには最適な量の潤滑材(専用グリース)が封入されていますので、決して注油しないで下さい。

株式会社ミキ・ニック樹脂フォークへの取り付け方法 (MK型固定金具)

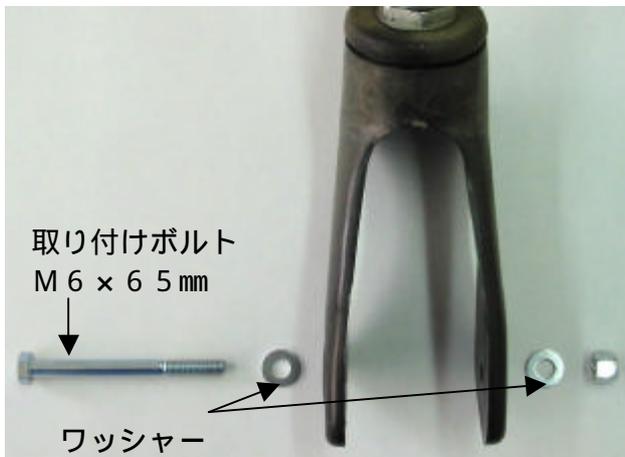

注意
取り付けボルトはアブソレックス内部本体のシルバー色部分に必ず通してください。



固定金具の方向に注意してフォークへ取付けてください。

注意

前フォークの形状により固定金具には種類があります。
この形状の前フォークの場合にはMK型固定金具を使用してください。

MK型固定金具



取り付け完了状態

固定金具ツメ



ARAYAの字が下側に位置するようにして下さい。

車椅子の進行方向



注意 1 : このホイールは一般型自走・介助用車椅子の前輪キャスター用に作られています。車椅子以外の用途には使用しないで下さい。



注意 2 : フォークの形状・内幅・取付穴径に応じて固定金具の種類があります、取付に際しては、適した金具とフォークの組み合わせをして下さい。フォークの形状・内幅・車輪取付穴径によっては取付できない場合があります、御了承下さい。



注意 3 : 防水構造ではありませんので水没するような使用はしないで下さい。




注意 4 : ご使用上 フォーク及びアブソレックスにキズや破損の無い事、車輪取付ネジの緩みの無い事に御留意下さい。




注意 5 : アブソレックスのベアリングには最適な量の潤滑材(専用グリース)が封入されていますので、ベアリングには決して注油しないで下さい。

鉄製フォークへの取り付け方法 (F型固定金具)

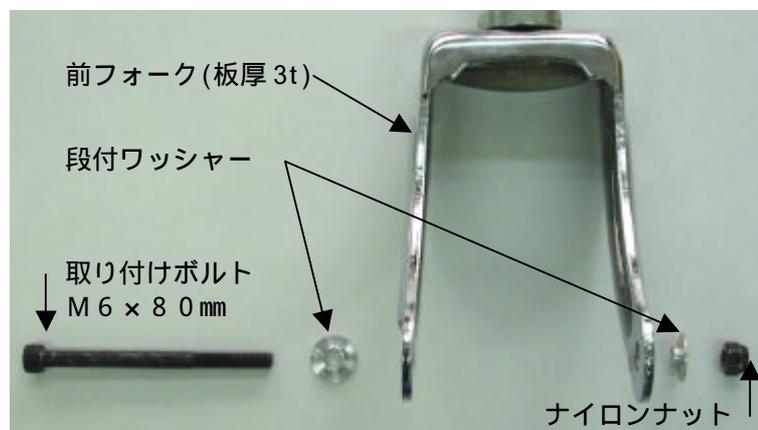


注意
 取り付けボルトは
 アブソレックス内部本体の
 シルバー色部分に
 必ず通してください。

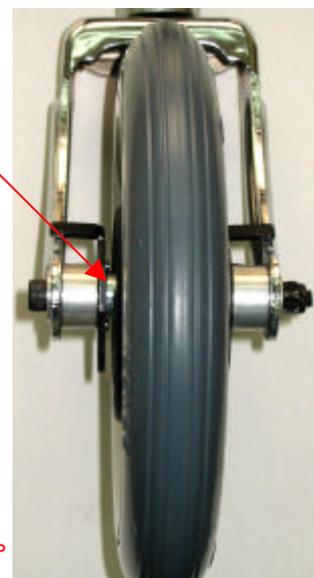

固定金具の方向に注意し前フォークへ取付けてください。

注意 前フォークの形状により固定金具には種類があります。
 この形状(スチール)のフォークの場合にはF型固定金具を使用してください。

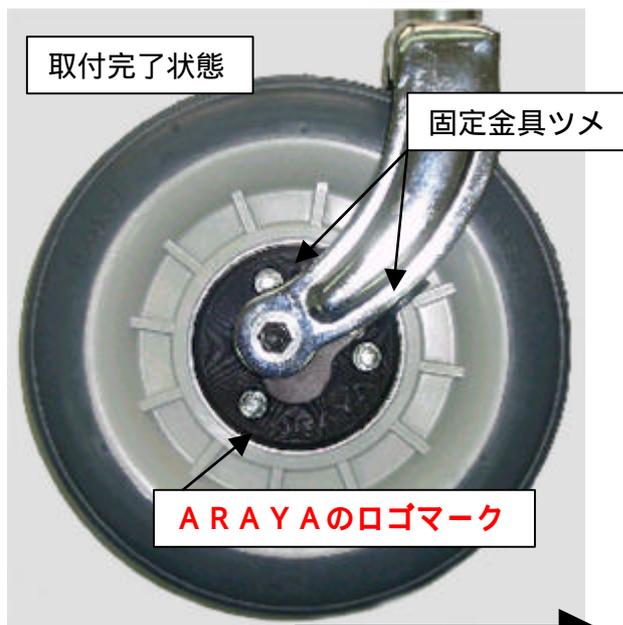

車椅子の進行方向

固定金具ツメを前フォークに当てた状態で六角ナットを固定してください。

アブソレックス本体の**ARAYAのロゴマーク**が**必ず下側**に位置するようにして下さい。

- 注意** 1 : このホイールは一般型自走・介助用車椅子の前輪キャスター用に作られています。車椅子以外の用途には使用しないで下さい。
- 注意** 2 : フォークの形状・内幅・取付穴径に応じて固定金具の種類があります、取付に際しては、適した金具とフォークの組み合わせをして下さい。フォークの形状・内幅・車輪取付穴径によっては取付できない場合があります、御了承下さい。
- 注意** 3 : 防水構造ではありませんので水没するような使用はしないで下さい。
- 注意** 4 : ご使用上 フォーク及びアブソレックスにキズや破損の無い事、車輪取付ネジの緩みの無い事に御留意下さい。
- 注意** 5 : アブソレックスのベアリングには最適な量の潤滑材(専用グリース)が封入されていますので、ベアリングには決して注油しないで下さい。